



Gebrauchsanweisung für statische und fixierende Orthesen Finger/Hand/Arm

SONDERANFERTIGUNG

der ORTEMA GmbH Orthopädie-Technik, Kurt-Lindemann-Weg 10, 71706 Markgröningen

Produkt- und Leistungsmerkmale

Liebe Kund:innen,

diese Informationen ergänzen die Gebrauchshinweise, die Sie von unseren Mitarbeiter:innen bei der Auslieferung Ihres Hilfsmittels erhalten haben. Bitte lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf. Beachten Sie die gegebenen Hinweise und bringen Sie Ihren Orthesen/Service-Pass zu jedem Besuch mit.

Bei nichtsachgemäßem Gebrauch Ihres Hilfsmittels oder Nicht-Einhaltung der vorgesehenen Wartungsintervalle ist unsere Haftung bei Schadensfällen eingeschränkt und kann ggf. ganz entfallen. Die Wartungsintervalle entnehmen Sie bitte dieser Gebrauchsanweisung oder Ihrem Orthesen/Service-Pass.

Die im Folgenden für Sie zutreffenden Informationen und Warnhinweise sind mit einem ☒ gekennzeichnet.

Herstellungsdatum: _____

Lebensdauer:

- ☐ 6 Monate ☐ 12 Monate ☐ 24 Monate
☐ 36 Monate ☐ _____

Wartungsintervall:

- ☐ 6 Monate ☐ 12 Monate ☐ _____

Bitte lesen Sie vor Gebrauch unseres Medizinprodukts die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheits- und Anwendungshinweise.

Ihr Hilfsmittel wurde speziell für Sie von unseren Mitarbeiter:innen angefertigt und bei Abgabe eingehend geprüft. Behandeln Sie Ihr Produkt sorgfältig, entsprechend der Einweisung unserer Mitarbeiter:innen und dieser Gebrauchsanweisung.

Sollten dennoch Probleme entstehen, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Service-Telefon: 07145 91-53800

Statische und fixierende Orthesen für Hand/Finger/Arm

- ☐ Fingerrinne
- ☐ Wintersteinorthese
- ☐ Fingerflinte
- ☐ Ringbandersatz
- ☐ 8er/16er Schlinge
- ☐ Daumenorthesen
- ☐ Antiulnardeviationsorthese
- ☐ Opponensorthese
- ☐ Palmare Handgelenksorthese
- ☐ Ulnarisspange
- ☐ Mittelhandspangen/dorsale IP-Orthese
- ☐ Lagerungsorthese
- ☐ Bowersorthese
- ☐ OA-UA-HG Orthese

Einsatzort/Einsatzbedingungen

- ☐ Wasserkontakt möglich
- ☐ kein Wasserkontakt möglich
- ☐ Sport möglich (nur nach Rücksprache mit Ärzt:in/Mitarbeiter:in)

Anwendungshinweise

Insbesondere bei einer Neuversorgung muss der Umgang mit der Orthese erlernt werden. Das An- und Ausziehen sowie die allgemeine Handhabung bedürfen eines gewissen Trainings. Ziehen Sie eventuell vorhandene Verschlüsse nicht zu straff, es kann sonst zu Stauungen kommen. Bei Klettverschlüssen ist darauf zu achten, dass diese exakt übereinander positioniert werden, um ein „Verkleben“ des Klettbandes mit der Kleidung zu vermeiden.

Die Orthese soll grundsätzlich beschwerdefrei sitzen. Übermäßiger Druck bzw. Druckstellen, Reizungen, Wundreibungen der Haut oder gar Ödeme führen zu Komplikationen und sind nicht zu akzeptieren! Sitz, Form und Funktion wurden durch uns kontrolliert. Bei Bedarf wird eine Nachpassung vorgenommen.

Nach dem Duschen oder Baden muss die Haut wieder komplett trocken und nicht aufgeweicht sein,

bevor Sie Ihre Orthese anziehen. Körperlotionen oder -cremes müssen ebenfalls vor Anlegen der Orthese vollständig eingezogen sein. Es handelt sich um Medizinprodukte, die immer für eine:n einzige:n Patient:in bestimmt sind. Die Verwendung durch andere Personen ist nicht erlaubt. Die Tragedauer und Häufigkeit der Anwendung werden von Ihrem Arzt bestimmt.

Sicherheitshinweise

Bei Problemen, Schäden oder Fehlfunktionen mit dem zu versorgenden Körperteil oder dem Produkt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an uns. Führen Sie bitte keine Änderungen bzw. Reparaturen in Eigenregie durch!

Reinigung und Pflege

Nach ärztlicher Rücksprache geschieht die Reinigung der Orthese durch Abreiben mit einem feuchten Tuch. Wenn die Orthese mit Körpersekreten, z.B. Blut, in Verbindung gekommen ist, so ist eines der folgenden Desinfektionsmittel zu verwenden:

- Sagrotan-Spray
- Kodan-Spray
- 3%ige Wasserstoffperoxid-Lösung

Achten Sie darauf, dass keine Rückstände des Desinfektionsmittels an der Orthese verbleiben.

Neben der Orthese bedürfen auch die von der Orthese umschlossenen Körperteile einer vermehrten Pflege. Tägliche Reinigung mit hautfreundlicher Seife ist daher dringend angeraten.

Inspektion und Wartung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei unserer Arbeit um eine handwerkliche Leistung handelt. Sollte es

während des Tragens der von uns gefertigten orthopädischen Hilfsmittel zu Schwierigkeiten (Druck- oder Scheuerstellen) kommen, bitten wir Sie sich umgehend mit uns zur Nachpassung in Verbindung zu setzen.

In Ihrem Orthesen-/Service-Pass hat unser/e Mitarbeiter:in den nächsten Kontrolltermin für Ihr Hilfsmittel vermerkt. Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie diesen Termin einhalten, um Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden. Achten Sie bitte auch auf alle Materialveränderungen, und setzen Sie sich zur Reparatur mit uns in Verbindung. Wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle von Ihnen nicht eingehalten werden, ist unsere Haftung bei Schadensfällen eingeschränkt und kann ggf. ganz entfallen.

Unsere Haftung erstreckt sich ausschließlich auf das Produkt in der von uns abgegebenen Form. Sie erstreckt sich nur auf Leistungen, die von uns vorgenommen wurden. Die Lebensdauer Ihres Produktes ist wie auf der ersten Seite angegeben, aber immer abhängig von der tatsächlichen Beanspruchung und nur bei Einhaltung der vorgegeben Wartungsintervalle.

Entsorgung

Im Sinne unserer Aktivitäten für den Umweltschutz bieten wir Ihnen an, Ihr Produkt zur Entsorgung bei uns abzugeben.

Konformitätserklärung

Unsere EG-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage unter ortema.de/downloads/konform oder scannen Sie einfach nebenstehenden QR-Code. Auf

Wunsch senden wir Ihnen die Konformitätserklärung auch gerne per Post oder per E-Mail zu.

